

QuikRead® CRP prefyldte cuvetter

Kort brugsvejledning



- 1
- Indlæs magnetkortet.
- Når instrumentet har været slukket.
 - Når et nyt kit tages i brug.



2

Åben cuvetten.



3

Tilsæt 20 µl fuldblod.



4

Sæt låget på og bland forsigtigt (ikke op og ned) til prøven er klar rød. Sæt cuvetten i aflæsningsbrønden.



5

Efter "blank" måling i max. 40 sek. tilsættes CRP-reagens ved at trykke den inderste del af låget ned.



6

Tag cuvetten op og ryst den **kraftigt** frem og tilbage. Sæt cuvetten tilbage i aflæsningsbrønden.



7

Instrumentet måler CRP koncentrationen i mg/L:
QuikRead: Indenfor 120 sek.
QuikRead 101: Indenfor 60 sek.
Aflæs resultatet.

For yderligere information, kontakt Orion Diagnostica A/S.



Møllevej 9A, 2990 Nivå

Tlf: +45 4975 5050, Fax: +45 4975 5055, e-mail: orion@oriondiagnostica.dk, www.oriondiagnostica.dk, www.quikread.com

QuikRead® CRP prefyldte cuvetter

Opbevaring af reagens



Uåbnet kit æske

Opbevaring ved 2–8°C:
Indtil udløbsdatoen på kittet.



Reagenslåg

Opbevaring ved 2–8°C:
Indtil udløbsdatoen på kittet.

Opbevaring ved 18–25°C:
1 måned.

Opbevaring ved 18–25°C:
7,5 timer/dag - 3 måneder.



Prefyldte cuvetter i uåbnet foliepakning

Opbevaring ved 2–25°C:
Indtil udløbsdatoen på kittet.



Åbnet cuvette

Testen skal udføres inden
2 timer fra cuvetten åbnes.
Vent til bufferen har
stuetemperatur, før testen
udføres.



Prefyldte cuvetter uden foliepakning

Opbevaring ved 2–8°C:
6 måneder fra fjernelse af
foliepakningen.

Opbevaring ved 18–25°C:
3 måneder fra fjernelse af
foliepakningen.

Find yderligere information på: www.quikread.com

QuikRead®



Møllevvej 9A, 2990 Nivå

Tlf: +45 4975 5050, Fax: +45 4975 5055, e-mail: orion@oriondiagnostica.dk, www.oriondiagnostica.dk, www.quikread.com

847-01DK, 3/2010