



Combur Test[®] urinteststrimler

Quickguide til visuel aflæsning af urinteststrimler



Combur Test urinteststrimler

Quickguide til visuel aflæsning af urinteststrimler




1 | Urinen opsamles i en ren og tør beholder. Prøven analyseres indenfor 2 timer. Bland urinprøven omhyggeligt.



2 | Tag en teststrimmel ud af beholderen og luk straks derefter beholderen igen.



3 | Dyp teststrimlen kort (ca. ét sekund) i urinen, og sørg for at alle testfelter fugtes. Når teststrimlen tages op, stryges kanten af mod beholderens kant for at fjerne overskydende urin.

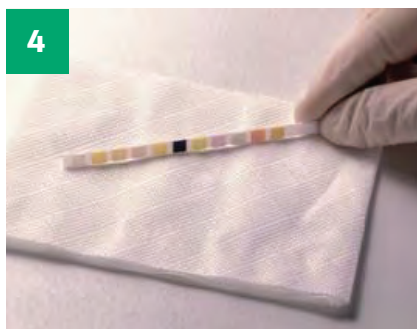

4 | Tør kanten og bagsiden af teststrimlen af på et absorberende underlag. Start stopuret.



5 | Vent 60 sekunder (60-120 sekunder for leucocytfeltet). Teststrimlen holdes lodret mod den lodrette beholder. Sammenlign reaktionsfarverne på testfelterne med farveskalaen på beholderens etiket. Sammenlign testfeltet blod med begge farveskalaer, da der er separate farveskalaer for erythrocytter (ERY) og hæmoglobin (Hb).



6 | Notér patientens identitet og de aflæste resultater på en resultatblok.