



HemoCue Safety Lancet



Det første trin
til et mere nøjagtigt
analyseresultat

HemoCue Safety Lancet

– enkel kapillærprøvetagning og nøjagtigt resultat

*F*or at sikre et nøjagtigt analyseresultat fra en kapillær blodprøve er det af vital betydning, at der fremkommer en spontan bloddråbe. Malkning af fingeren for at få tilstrækkeligt blod kan påvirke analyseresultatet – specielt i forbindelse med bestemmelse af hemoglobin. Et spontant blodflow kan kun opnås ved at bruge en god prøvetagningsteknik, hvor et vigtigt element er et tilstrækkeligt dybt indsnit.

Dette er årsagen til, at HemoCue, som producent af analysesystemer til hurtige og nøjagtige blodanalyser, har valgt at lancere et nyt prøvetagnings-system – HemoCue Safety Lancet. Ved korrekt brug minimerer den nye lancet risikoen for fejl på prøvematerialet

HemoCue Safety Lancet kombinerer:

- *Indstik*

HemoCue Safety Lancet laver et tilstrækkeligt dybt indstik (2,25 mm), der sikrer det nødvendige blodflow.

- *Sikkerhed*

HemoCue Safety Lancet punkterer huden og går automatisk tilbage inden for et til to millisekunder. Nålen er fuldstændigt skjult inde i plastholderen før og efter brug. Lancetten kan ikke genanvendes.


- *Simpel*

HemoCue Safety Lancet leveres klar til brug. Drej beskyttelseshætten af nålen, sæt lancetten mod punkturstedet og tryk på det hvide stempel i toppen.

- *Komfort*

HemoCue Safety Lancets særlige skarpe nål og hurtige indstik nedsætter smertepåvirkningen.

DEN ENKLE MÅDE AT FORETAGE KAPILLÆRPRØVETAGNING

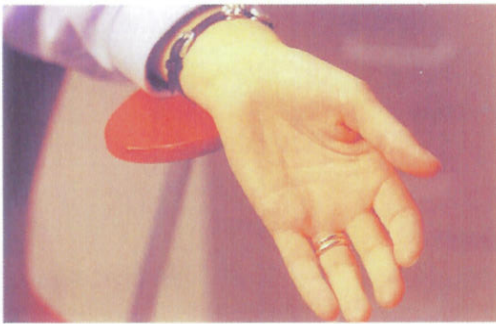

1. Patienten bør sidde behageligt. Inden prøvetagningen skal hånden være varm for at gøre gennemstrømningen i kapillæret så god som mulig. Fingrene skal være strakte, men ikke spændte.



2. Anvend 3. eller 4. finger til prøvetagningen. Undgå at anvende fingre med ringe. Rens prøvetagningsstedet med en desinfektionsserviet og lad det tørre.



3. Drej beskyttelseshætten af.



4. Pres meget let med tommelfingeren fra det yderste led op mod blommen. Dette stimulerer blodcirkulationen på prøvetagningsstedet.



5. Tommelfingeren er nu presset let op mod blommen. Stik i siden af fingeren. Her er blodgennemstrømningen størst og smerten mindst. Stik direkte i blommen kan være skadeligt.



6. Pres lancetten ned mod fingerspidsen og aktivér lancetten ved at trykke det hvide stempel helt ned. Brugte lancetter skal efter brug behandles som risikoaffald.



7. Afør de første 2-3 dråber blod med en tør serviet, dette stimulerer blodgennemstrømningen.



8. Hvis nødvendigt presses let med tommelfingeren indtil nyt blod fremkommer. Undgå "malkning". Fyld kuvetten på normal vis.