



## Brugsvejledning til medi Butlere

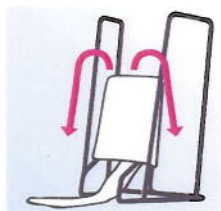

**1.**

Sæt først medi butleren på en fast flade med den brede side af bunden vendt mod dig og åbningen i den halvrunde ramme vendt fremad. Sæt kompressionsstrømpen i bøjlens med strømpetåen vendt fremad. Vend indersiden ud og over rammen på den øverste kan af strømpen.

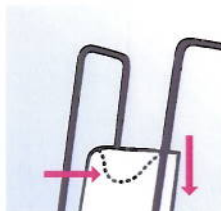

**2.**

Før strømpen ned over bøjlens, indtil hælen kommer til syne ved kanten af bøjlens.



**3.**

Anbring nu medi butleren på gulvet. Før foden med tæerne først ind i tåen på strømpen. Det anbefales, at du læner dig mod noget fast (bord, væg) for at opnå stabilisering.



**4.**

Træd nu ind i det stive stativ. Kontrollér at tåen og hælen er korrekt placeret.




**5.**

Ved skiftevis at trække i og slippe de to håndtag kan du nu føre strømpen op mod knæet.



**6.**

Når strømpen er lige under knæet, skal du vippe medi butleren let tilbage og fjerne den fra strømpen.

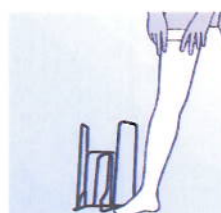

**7.**

Slut med at glatte kompressionsstrømpen jævnt opad. Sørg for at trække strømpen op stykke for stykke uden at samle den sammen eller trække i kanten.