



Blødgør og fjerner
overskydende ørevoks
samt lindrer kløe
- enkelt og effektivt



Registrering

Medicinsk udstyr, klasse 1.

Indikation

Blødgør og fjerner overskydende ørevoks samt lindrer kløe i øregangene.

Indhold

Renset olivenolie fremstillet efter farmaceutisk standard.

Anvendelse

Vaxol ørespray sprayer ind i øregangen med en afmålt mængde. Kan anvendes når man sidder eller står.

Vaxol kan anvendes af børn fra 1 år og alle voksne - både forebyggende og behandlende.

Vaxol er desuden nem at administrere for ældre mennesker. Hold flasken i lodret position med sprayhovedet placeret i den ydre øregang og tryk sprayhovedet helt ned 1 eller 2 gange.

Massér forsigtigt ved øregangens åbning.

Tips / Godt at vide

- Blødgør og forebygger ørevoks.
- Lindrer kløe i øregangene.
- Danner en barriere mod vand ved svømning og bad.
- Kan anvendes til voksne og børn fra 1 år.
- Sprayhovedet kan ved behov tages af og skylles i varmt vand.
- Vaxol er holdbar i 6 måneder efter at være taget i brug.

Yderligere information findes på www.vaxol.dk

Produkt

Vaxol ørespray

Varenr.

92630

Pakningsstørrelse

10 ml

