


## Patient ID armbånd

Fordele ved brug af Patient ID armbånd i forhold til traditionelle armbånd.

- Nemme at montere.
- Nemme at opbevare.
- Ingen generende tryklåse.
- Der kan skrives direkte med kuglepen, speedmarker eller skrivemaskine.
- Alternativt kan påklæbes udprintede data fra patient registreringsetiketter.
- Ingen brug af kartonkort.
- Ingen indstik i tidskrævende plastlommer.
- Ingen løse stropper der skal afkortes efter montering.
- Trinløs montering for alle håndledstykkelser.
- Miljøvenligt fremstillet af mat trans. PE folie, ingen CO2 udslip ved afbrænding.
- Ved sammenklæbning 100% vandtæt.
- Hygiejnisk, let og behagelig at have om håndled.
- Store besparelser ved indkøb.

# PVC FRI

## Patient ID armbånd

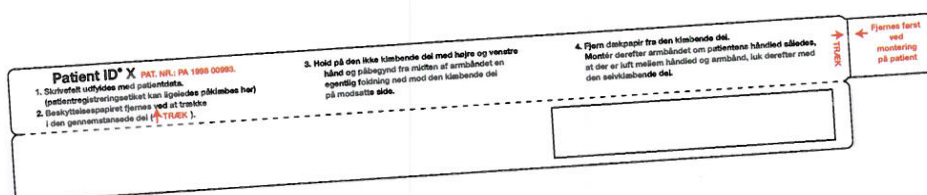

- Nemme at montere.
- Ingen generende tryklåse.
- Der kan skrives direkte med kuglepen, speedmarker eller skrivemaskine.
- Alternativt kan påklæbes udprintede data fra patient registreringsetiketter.
- Ingen brug af kartonkort.
- Ingen indstik i tidskrævende plastlommer.
- Ingen løse ender der skal afkortes efter montering.
- Trinløs montering for alle håndleds-tykkelser.
- Miljøvenligt fremstillet af mat transparent PE folie, ingen CO<sup>2</sup> udslip ved afbrænding.
- Ved sammenklæbning 100% vandtæt.
- Hygiejnisk, let og behagelig at have om håndledet.
- Store besparelser ved indkøb.
- Rekvirere prøver og specifikationer på nedenstående.



Møllevej 14-16  
2791 Dragør

[www.ganket.dk](http://www.ganket.dk)

Tlf. 32 53 93 00  
Fax 32 53 95 71

[ganket@ganket.dk](mailto:ganket@ganket.dk)

## PVC FRI



1. Skrivefelt udfyldes med patientdata. (patientregistreringsetiket kan ligeledes påklæbes her)
1. Fyll i patientens data i skrivfältet (patientregistreringsetikett kan också alternativt klistras här).




3. Hold på den ikke klæbende del med højre og venstre hånd og påbegynd fra midten af armbåndet en egentlig foldning ned mod den klæbende del på modsatte side.
3. Håll den icke självhäftande delen med båda händerna mot bordsskivan och vik från mitten papperet över den självhäftande folien och pressa ut mot kanterna.

**GANKEI**

Møllevej 14-16 · 2791 Dragør  
tlf. 32 53 9300 · fax 32 53 95 71

Genbestil. nr. / Återbest nr. xxxxxx

Forhandler:  
Återförsäljare:

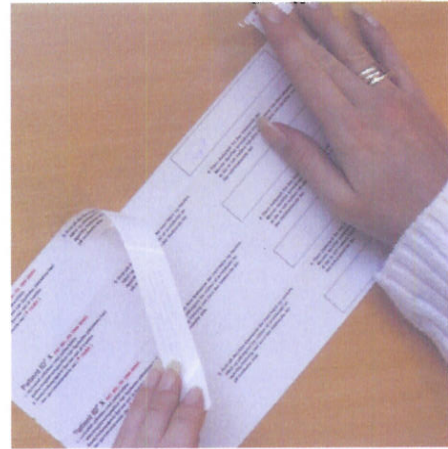

2. Beskyttelsespapiret fjernes ved at trække i den gennemstansede del (↑ TRÆK).
2. Vänd arket och dra skyddspapperet och folien i riktning (↑ TRÆK).



4. Fjern dækpapir fra den klæbende del. Monér derefter armbåndet om patientens håndled således at der er luft mellem håndled og armbånd, luk derefter med den selvklæbende del.
4. Montera därefter folien (armbandet) runt handleden med lagom luft emellan och fäst mot den självhäftande delen.

www.ganket.dk · ganket@ganket.dk