


Varenummer 244108

Subcutankanyle, BD Saf-T-Intima, gul, 24G, x 0,75 (0,7 x 19 mm), steril, engangs

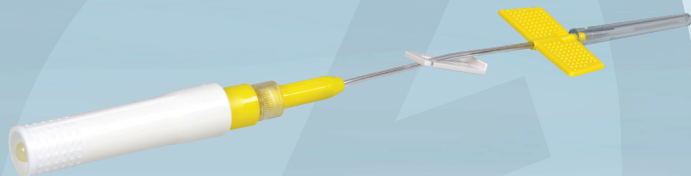

Produktbeskrivelse

BD Saf-T-Intima anvendes til subkutan injektion eller infusion. Kanylen indføres i en vinkel på 30-45 grader. Efter placering af den subkutane kanyle trækkes kanylen tilbage i sikkerhedsskjold og således forbliver kun et tyndt plastkateter i patienten, hvilket giver mindre gener. Fyldevolumen i slangen er 0,2 ml. Slangen skal ikke forfyldes. Liggetid 3-5 døgn i henhold til Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer 2016.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Subcutankanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Saf-T-Intima
Farve	Gul
Features	X 0,75 (0,7 x 19 mm), steril
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	24G
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	4 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	49 cm	26 cm	39.5 cm	50382903833189
pk	25 stk	19 cm	12 cm	24.2 cm	30382903833185
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE