



Oxoid

Resistensbestemmelse

Zonestørrelser for Mueller Hinton agar med disks fra Oxoid

Varenr.	Antibiotikum	Disk Betegnelse	Bemærk	S	R
				Følsom	Resistent
245008	Trimetoprim	W 5		≥ 18	≤ 15
245004	Sulfonamid	S3 300		≥ 17	< 13
245009	Ampicillin	AMP 10	Gælder enterobakterier og enterokokker	≥ 17	< 14
245000	Nitrofurantoin	F 100	Gælder E.coli	≥ 11	< 11
245000	Nitrofurantoin	F 100	Gælder enterokokker og streptokokker	≥ 15	< 15
245014	Mecillinam	MEL 10	Gælder enterobakterier	≥ 15	< 15
245074	Ciprofloxacin	CIP 5	Virker på Gram- positive kokker	≥ 22	< 19

Zonestørrelser angivet af Oxoid

Zonestørrelser for Iso-sensitest agar med disks fra Oxoid

Varenr.	Antibiotikum	Disk- indhold i µg	Zonestørrelse i mm Gram-negative stave		Zonestørrelse i mm Gram-positive kokker		Bemærk
			Følsom	Resistent	Følsom	Resistent	
245008	Trimetoprim	5	≥ 17	≤ 13	≥ 17	≤ 13	
245004	Sulfonamid	300	≥ 19	≤ 16	≥ 19	≤ 16	
245000	Nitrofurantoin	100	≥ 17	≤ 13	≥ 17	≤ 13	Enterokokker 20/16 S. saprophyticus 24/20
245009	Ampicillin	10	$\geq 19^*$	≤ 11	≥ 28	≤ 24	
245014	Mecillinam	10	≥ 24	≤ 13	Disse antibiotika virker ikke på Gram- positive kokker		
245015	Nalidixan	30	≥ 20	≤ 19			
245010	Ciprofloxacin	10	≥ 26	≤ 19			

Zonestørrelser angivet af Oxoid

*Gælder kun E.coli og Proteus mirabilis. Andre Gram-negative stave er resistente for ampicillin.

Holdbarhed: 1 uge efter åbning.

Du er altid velkommen til at kontakte din konsulent hos Abena eller
Abena Kundeservice på tlf. 74 31 05 44.