

Zetuvit® E

Absorptionsforbinding

Zetuvit E er en absorptionsforbinding til væskende sår, akutte og kroniske. Fungerer også som beskyttelse. Forbindingen består af fire forskellige materialeg, som komplementerer hinanden og giver forbindingen dens gode egenskaber.



- 1 Høj absorptionskapacitet
- 2 Cellulosefluff gør forbindingen blød og polstrende
- 3 Den blå farvestribe reducerer risikoen for ukorrekt anvendelse
- 4 Den hydrofile forside gør at forbindingen ikke fæstner i såret

Fordele:

Høj absorptionskapacitet
Enkel håndtering
Blød og komfortabel
Mange størrelser
Fås både steril og usteril



Egenskaber

Forbindingen har en høj absorptionskapacitet og opsuger hurtigt eksudat. Forbindingen er let at kombinere med andre typer forbindinger som salvekompresser eller calciumalginater.

Materiale

Zetuvit E er en firelags forbinding. Den absorberende kerne består af cellulosefluff og er indsluttet i et tyndt non-woven væv af cellulose, som fordeler væsken jævnt i forbindingen. Bagsiden med blå farvestribe består af non-woven polypropen og er vætskeafvisende, men åndbar. Dette forhindrer, at eksudatet danner klumper i forbindingen. Forsiden består af hydrofil non-woven polypropen, som gør, at forbindingen ikke fæstner i såret.

Steril produkt er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril.
CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.
Usteril produkt er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril.
CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

Indikation

Bruges primært som absorptionsforbinding til væskende sår, akutte og kroniske. Mekanisk beskyttelse. Zetuvit E bør ikke anvendes på tørre sår, fritliggende knogler, muskler eller sener.

Fikseringsinstruktion

Zetuvit E kan fikseres med bind, tape, tubegaze eller fikseringsnet alt efter behov og sårets placering.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelser	Varenr.	Antal pr.æske	Karton
Zetuvit®E Steril, enkeltpakket	10 x 10 cm	413 770	25 stk	9 Æsker
	10 x 20 cm	413 771	25 stk	9 Æsker
	15 x 25 cm	413 773	10 stk	10 Æsker
	20 x 25 cm	413 775	15 stk	6 Æsker
	20 x 40 cm	413 786	5 stk	8 Æsker
Usteril	10 x 10 cm	413 860	50 stk	12 Æsker
	10 x 20 cm	413 861	50 stk	4 Æsker
	15 x 25 cm	413 863	50 stk	3 Æsker
	20 x 20 cm	413 864	50 stk	4 Æsker
	20 x 25 cm	413 865	50 stk	4 Æsker
	20 x 40 cm	413 866	30 stk	4 Æsker