

oppumpning


all up®

heel up®



1

Indsæt adapter i ventilåbning,
Drej og pres let adapteren ned i ventilen til den sidder fast.
Pres kun adapterens yderste "rør" ned i ventilen !

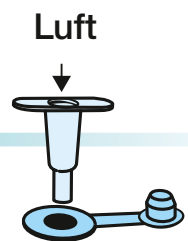


2

all up®
- Pump puden 3/4 op.

heel up®
Følg vejledningen på hælløfteren.


3

Træk adapteren ud af ventilen, ved at holde imod
ventilen med 2 fingre, som anvist på figuren.

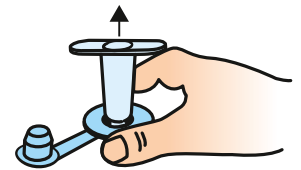

4

Luk luft ud til løftehøjde med adapteren.
VIGTIGT ! Pudnen må ikke være hårdt oppumpet.
Den skal være blød og eftergivende for optimal lejrning.

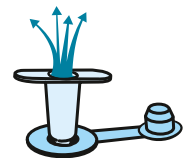

5

Luk ventilen.



6

For yderligere sikring kan ventilen
forsynes med ventildække.

