


Cuticell® Contact

Silikonekontaktlag

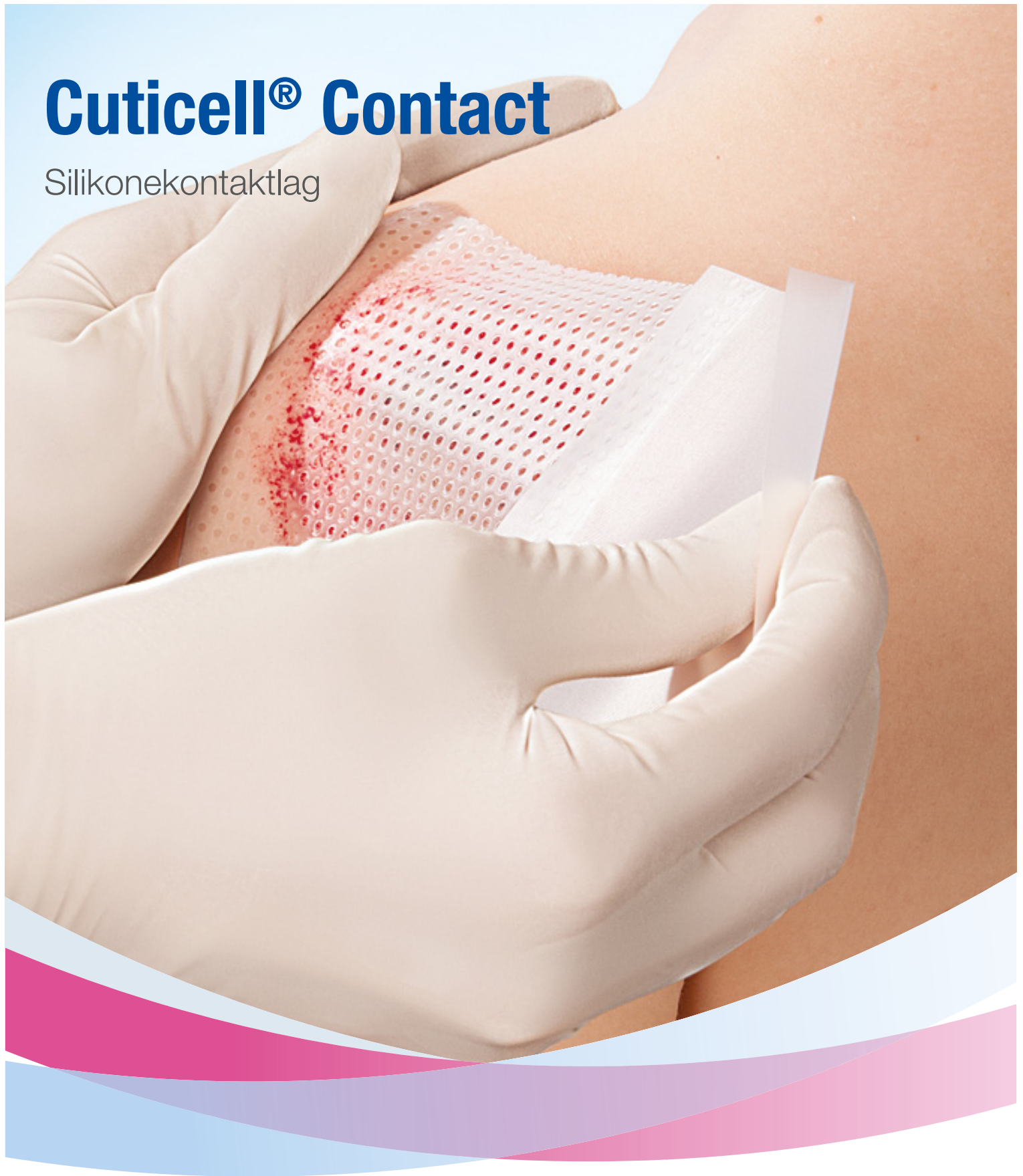

Cutimed®

Cuticell® Contact


Silikonekontaktlag

Cuticell® Contact er et silikonekontaktlag med en perforeret, gennemsigtig struktur, som er meget formbar. Det gør Cuticell® Contact til et effektivt primær sårkontaktlag.

Optimal, Perforeret Struktur

Med op til ti perforeringer pr. cm² sikrer Cuticell® Contact, at selv meget viskøst ekssudat let kan trænge igennem.

- Til sår med lavt til højt ekssudatniveau
- Forebygger maceration

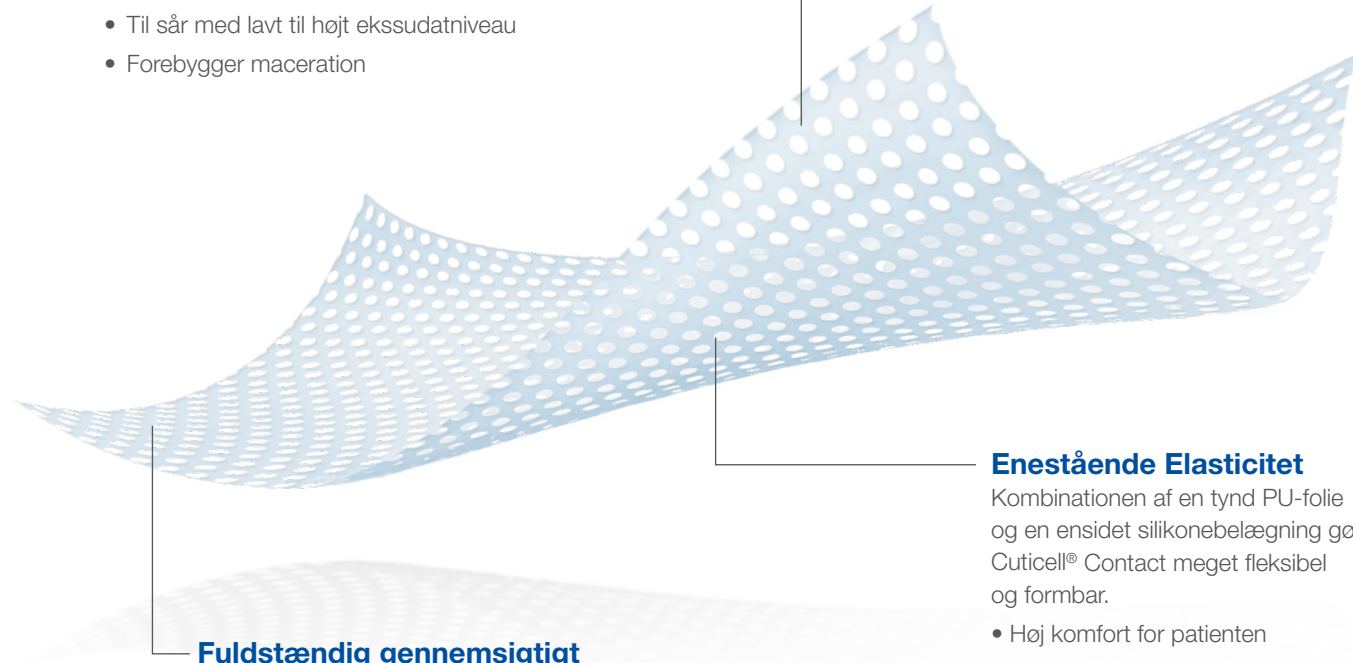

Fuldstændig gennemsigtigt

Cuticell® Contact er transparent og gør produktet let at applicere nøjagtigt.

- Præcis applikation
- Let at inspicere såret uden at fjerne silikoneforbindingen

Enestående Elasticitet

Kombinationen af en tynd PU-folie og en ensidet silikonebelægning gør Cuticell® Contact meget fleksibel og formbar.

- Høj komfort for patienten
- Let at applicere på selv vanskelige steder
- Bliver siddende og klæber ikke til handsken



Siltec-Teknologi

Cuticell® Contact anvender Siltec-teknologi. Den silikonebelagte kontaktflade klæber kun til tør, sund hud, hvilket giver en meget skånsom klæbeeffekt.

- Optimal beskyttelse af hud og sår
- Sidder sikkert, uden at klæbe til sårbinden
- Fjernelse er smertefri og skånsom overfor vævet
- Efterlader ikke rester
- Allergivenligt


Sårvenlig fra start til slut

Når Cuticell® Contact er appliceret, kan det blive siddende i 14 dage og beskytte såret. Ekssudat kan nemt trænge igennem perforeringerne, og der er minimal risiko for, at vævet vokser fast i sårkontaktlaget. Da der kun er silikone på kontaktsiden, kan den sekundære forbinding nemt skiftes uden at forårsage skade.

- Uforstyrret sårheling
- Smertefrit, atraumatisk bandageskift
- Høj patientkomfort
- Omkostningseffektiv



Let at håndtere

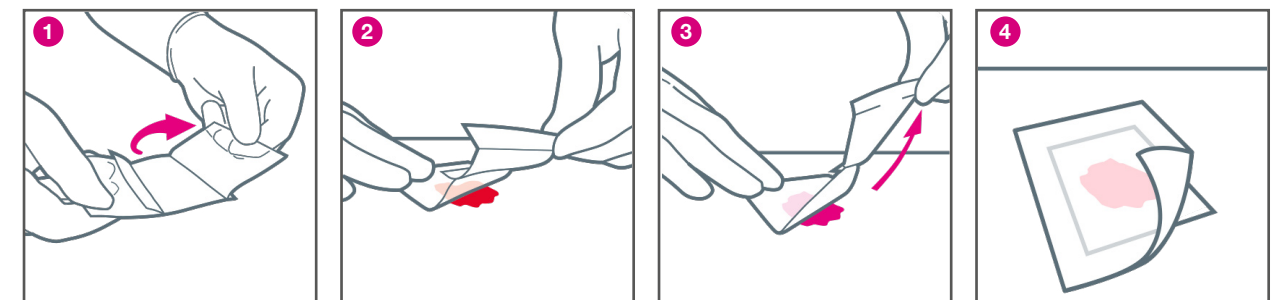

Fjern den overlappende del af beskyttelsesfolie fra forbindingsens klæbende side.

Påfør Cuticell® Contact med den klæbende side mod såret, idet du sørger for, at sårkanten overlappes med 2 cm.

Fjern det andet lag beskyttelsesfolie fra forbindingen og glat forsigtigt forbindingen ud med hånden.

Cuticell® Contact kan kombineres med absorberende sekundære bandager:

- Cutisorb® (absorberende kompres)
- Cutisoft® (non-woven kompres)
- Cutisoft® Cotton (gazekompres)

Til fiksering anbefales følgende produkter:

- Elastomull®
- Elastomull® haft/color
- Fixomull® stretch

Indikationer

Silikonekontaktlaget er egnet til følgende sårtyper:

- Snitsår
- Hudafskrabninger
- Forbrændinger
- Kroniske sår (sammen med sekundære, absorberende bandager)
- Rifter
- Vabler
- Hudlæsioner
- Også velegnet til beskyttelse af huden (f.eks. efter strålebehandling)
- Kan bruges sammen med antiseptiske midler
- Velegnet til særligt følsom og skrøbelig hud

Cuticell® Contact kan anvendes til følgende typer sår:

Sårfase



Fibrinbelægning



Granulation



Epitelisering

Sårdybde



Overfladisk

Ekssudat



Let til moderat



Moderat til kraftigt



Kraftigt til meget kraftigt

Bestillingsoplysninger

Art.nr	Størrelse	Stk./æske	Æsker/kolli
72680-00000	5 cm x 7,5 cm	5	150
72680-00001	7,5 cm x 10 cm	5	100
72680-00002	10 cm x 18 cm	5	100
72680-00003	15 cm x 25 cm	5	50

