





Disposable Tourniquet


BRUGSANVISNING

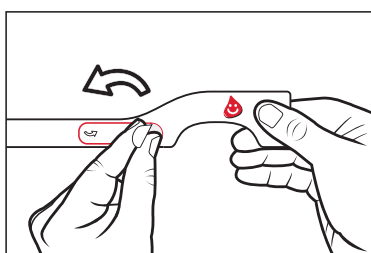


1.
Fjern den rødmarkerede
dækfolie fra klæbe-
fladen.

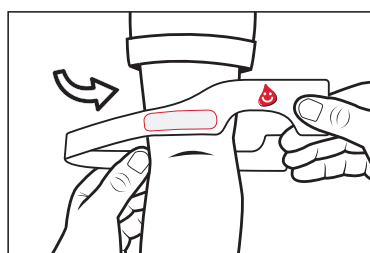


2.
Før venstre hånd bag
om patientens arm ...

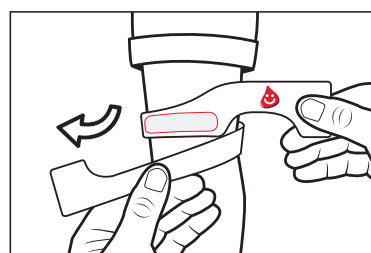


3.
... viderefør rundt under
højre hånd.

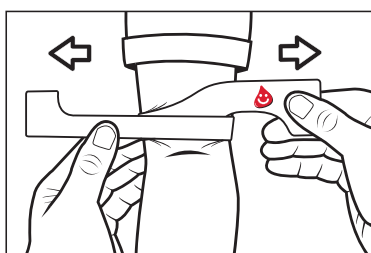

4.
Stram med begge
hænder og placer
øverste del af ApoTIE
over klæbefladen.

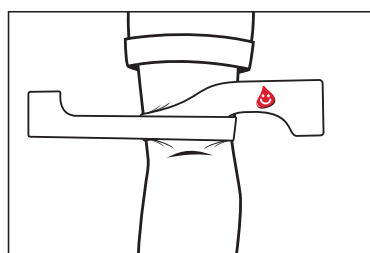

5.
ApoTIE er nu staset
korrekt.

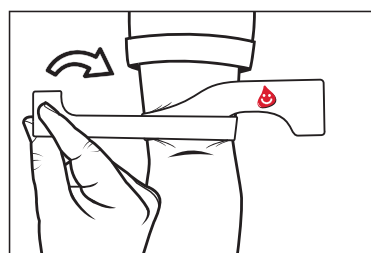

6.
Afmonter ApoTIE med
en enkelt bevægelse.

For mere information:

ApodanNordic A/S
Lergravsvej 63
2300 København S.

Tel: +45 32 97 15 25
Fax: +45 32 97 21 01
www.apodan.dk
Mail: info@apodan.dk

