

Latex operationshandsker

Varenummer 290110-290117

Sensiflex

Latex operationshandsker
Pudderfri og naturfarvet



Beskrivelse

Operationshandske i latex fremstillet af naturgummi
Pudderfri
Sterile
Naturfarvet
Tekstureret håndflader
Polymer coated for lettere påtagning
Med rullekant
Anatomisk form
Produceret i Malaysia

CE

CE-mærket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC samt EU direktiv 89/686/EEC, CAT III
Klasse IIa
AQL ≤ 1,5

Standarder

EN 455
EN 374
EN 388
EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:	
Før belastning	12 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	9 Newton
Hele holdbarhedsperioden	9 Newton

Latex operationshandsker

Varenummer 290110-290117

Strækkevne:
 Før belastning min. 750%
 Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 600%

Forpakning

50 par pr. æske
 4x50 par. pr. karton

Tykkelse (single wall)

Håndfladen 0,21 mm (+/- 0,03)
 Fingrene 0,22 mm (+/- 0,03)
 Håndled 0,18 mm (+/- 0,03)
 Længde: 290 mm

Test udført

FitKit test
 Sensibiliseringstest
 Irritationstest
 Cytotoksicitet
 Rest kemikalier
 Brudstyrke
 Virus penetration
 Puderrester
 Endotoxintest
 Proteinindhold – Testmetode Modified Lowry EN 455-3
 Proteinindhold målt til <50 µg/g

Sammensætning

Kemikalie	CAS	Restkemikalier
Naturligt gummi latex	-	
Svovl	7704-34-9	
Zinc oxide	1314-132	
ZDBC	109-89-7	ND
ZDEC	136-23-2	ND
Antioxidant	-	
Polymer	-	
Titanium Dioxide	-	

Latex operationshandsker

Varenummer 290110-290117

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Methanol	67-56-1	<1 min	0
Acetone	67-64-1	<1 min	0
Acetonitrile	75-05-8	<1 min	0
Natrium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min	6
Svovlsyre 96%	7664-93-9	>10 min	1
Cystostatika			
Carmustine (BCNU) 3.300 ppm		>480 min	6
Ciplatin 1.000 ppm		>480 min	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min	6
Flurouracil 50.000 ppm		>480 min	6
Mitoxantrone 2.000 ppm		>480 min	6
Irinotecan 20.000 ppm		>480 min	6
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm		>480 min	6
Thiotepa 10.000 ppm		>480 min	6

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 5 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: handsken er ikke længere steril efter åbning

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis mistanke om kontaminering, skal de bortskaffes som klinisk affald.

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderligere vejledning: Handskerne er egnet til invasive procedurer, men ikke procedurer med stærk kemi.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder naturlig gummilatex, der kan forårsage allergiske reaktioner og anafylaktisk shock.