

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

Classic Nitrilhandsker, pudderfri



Beskrivelse

Undersøgeshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)
Pudderfri
Usteril
Blå
Mikrotekstureret fingerspidser
Med rullekant
Egnet til håndtering af fødevarer
Produceret for Abena A/S DK i Malaysia under ISO 9001 og ISO 13485

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC, klasse I og EU-direktiv 89/686/EEC/
Regulative EU 2016/425,
Class I og CAT. III
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4
EN 374-1:2016
EN 374-2:2015
EN 374-3:2003
EN16523-1:2016
EN 374-4:2013
EN 374-5:2016
EN 420
ASTM D6978-05

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:	
Før belastning	6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton

Strækkevne:	
Før belastning	min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 400%

Forpakning

150 stk. pr. æske
10x150 stk. pr. karton
54 kartoner pr. palle

Tykkelse

Håndfladen	0,07 mm (+/- 0,02)
Fingrene	0,09 mm (+/- 0,02)
Håndled	0,05 mm (+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
Xsmall	290417	5-6	76	240
Small	290418	6-7	86	240
Medium	290419	7-8	98	240
Large	290420	8-9	107	240
Xlarge	290421	9-10	115	240

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Mikrobiologi
Pudderrester
Virusgennemtrængning
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)
Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater)

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

Sammensætning

Kemikalie	CAS	Rest kemikalier
Nitrile NBR	9010-81-5	
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (SDBS)	85117-50-6	
Sulphur	7704-34-9	
Zinc oxide	1314-13-2	
ZDBC	136-23-2	Ikke målbart
Titanium dioxide	13463-67-7	
Wax Emulsion	-	
Blue Pigment	147-14-8 & 6358-30-1	

Kemikalierne og mængderne anvendt er i overensstemmelse med US 21 CFR 177

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS	Gennemtrængningstid	Klasse
Aceton	67-64-1	< 1 min.	0
Acylamide 50%	79-06-1	>480 min.	6
Ammonium hydroxide 25%	1336-21-6	6 min	0
Citronsyre 15%	77-92-9	>480 min.	6
Dichloromethane	75-09-2	1 min	0
Diethylamine	109-89-7	<1 min.	0
Eddike syre 10%	64-19-7	119 min.	3
Ethanol 35%	64-17-5	20 min.	1
Ethanol 70%	64-17-5	10-14 min.	0
Ethidium Bromid 0,1%	1239-45-8	>480 min.	6
Formaldehyde 37%	50-00-0	241-360 min.	5
Formalin 10%	50-00-0	>480 min.	6
Gluteraldehyde 1%	111-30-8	>480 min	6
Gluteraldehyde 3%	111-30-8	>480 min.	6
Gluteraldehyde 4%	111-30-8	361-480 min	5
Hydrofloric acid 40%	7664-93-3	7-9 min.	0
Hydrogen Peroxide 3%	7722-84-1	>480 min.	6
Hydrogen Peroxide 30%	7722-84-1	31-45 min.	2
Isopropanol 98-100%	67-63-0	2 min.	0
Isopropanol 10%	67-63-0	46 min	3
Iodine 5%	7553-56-2	31-45 min.	2
Klorhexidine 4%	55-56-1	> 480 min.	6
n- Hexane	110-54-3	3 min.	0
n-Heptane	142-85-5	15 min	0
Klorin 1000 ppm		>480 min.	6
Methanol	67-56-1	1 min	0
Natrium carbonate 5%	497-19-8	>480 min.	6
n-propanol	71-23-8	<1 min.	0
Natrium Hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6
Svovlsyre 96%	7664-93-9	4 min.	0
Destilleret petroleum		>1 min.	0
Perchloric syre		>60 min.	0

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

Cytostatika

Carmustine 3.300 ppm	72 min	4
Cisplatin 1.000 ppm	>480 min.	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>480 min.	6
Dacarbazine 10.000 ppm	>480 min.	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>480 min.	6
Etoposide 20.000 ppm	>480 min.	6
Fluorouracil 50.000 ppm	>480 min.	6
Methotrexate 25.000 ppm	>480 min.	6
Mitomycin C 500 ppm	>480 min.	6
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm	>480 min.	6
ThioTepa 10.000 ppm	>480 min.	6
Vincristine Sulfate 1.000 ppm	>480 min.	6

Testmetode anvendt: EN 374-3

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vynilhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ¹	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ²	✓	%	%
Rengøring ³	✓	✓	✓
Fødevarer godkendt ⁴	✓	✓	✓

SK114/DK/12.2014

¹ Specifikke cytotatika test er anført på databladet. ² Olieholdige cremer og sæber.

³ Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ⁴ Vynilhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 5 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges