



Nitrilhandsker

Varenummer 290471 - 290475

Classic

Nitrilhandsker, Pudderfri, blå, Sensitive



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usterile

Lyseblå

Ru fingerspidser – yderst god gennemfølingsevne

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001, ISO 14001 & ISO 13485

CE

CE-mærket i henhold til EU MD direktiv 93/42/EEC klasse I samt

PPE direktiv 89/686/EEC eller PPE Regulativ EU 2016/425 som CAT III

AQL 1,5 i henhold til EN 455-1 og prøveudtagningsplan ISO 2859-1.

Kemikalierne testet i henhold til EN 374-1:2016 Tabel 2 listet kemikalier A-T

(K) Sodium hydroxide 40%

(T) Formaldehyde 37%

(P) Hydrogen peroxide 30%

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN 374-3:2003

EN 16523-1:2015

EN 374-4:2013

EN 374-5:2016 VIRUS

EN 420.2003 + A1:2009

ASTM D 6978-05

ASTM D 6319-10

ASTM F 1671



Nitrilhandsker

Varenummer 290471 - 290475

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:	
Før belastning	6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton
Strækkevne:	
Før belastning	min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 400%

Forpakning

100 stk. pr. æske
10 x 100 stk. pr. karton
60 kartoner pr. palle

Tykkelse

Håndfladen	0,06 mm	(+/- 0,02)
Fingrene	0,08 mm	(+/- 0,02)
Håndled	0,05 mm	(+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
X-small	290471	5-6	75	240
Small	290472	6-7	85	240
Medium	290473	7-8	95	240
Large	290474	8-9	106	240
X-large	290475	9-10	116	240

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Pudderrester
Virusgennemtrængning
Fødevaregodkendelse
Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater nederst på databladet)



Nitrilhandsker

Varenummer 290471 - 290475

Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Nitril	9003-18-3
Titanium Dioxid	13463-67-7
Zinc oxid	1314-13-2
Anti oxidant	68610-51-5
Svovl	7704-34-9
Kalium Hydroxide	1310-58-3
Klorin	7782-50-5
Zinc Diethyldithiocarbamate	14324-55-1 (Ej målbart restindhold)
Zinc Dibutyldithiocarbamate	136-23-2 (Ej målbart restindhold)
Phthalocyanine blue	147-14-8

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges



Nitrilhandsker

Varenummer 290471 - 290475

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Level
Acetone	67-64-1	<1 min	0
Ammoniak 25%	1336-21-6	6 min	0
Chloramine-T(in klorilli solution) 0,5%		>480 min.	6
Chloramine-T(in klorilli solution) 5-15%		225 min.	4
Diethylamine	109-89-7	<1 min	0
Dismofix B 1%		>480 min	6
Dismofix K 1%		>480 min	6
Dismozon pur 1%		>480 min	6
Dismozon pur 4%		>480 min	6
Diurethane Dimethacrylate	72869-86-4	>480 min	6
DMSO	67-68-5	3 min	0
Eddikesyre 10%	64-19-7	90 min	3
Ethanol 1,5%	64-17-5	>480 min	6
Ethanol 35%	64-17-5	<10 min	0
Ethanol 70%	64-17-5	<10 min	0
Ethanol 99%	64-17-5	<1 min	0
Ethidium bromide 5%	1239-45-8	>480 min	6
Formaldehyde 37% / Formalin 37% (T)	50-00-0	>480 min	6
Glutaraldehyde 4%	111-30-8	>480 min	6
Glutaraldehyde 10%	111-30-8	>480 min	6
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min	6
Hydrogen peroxide 30% (P)	7722-84-1	46-60 min	2
2-Hydroxyethyl Methacrylate 97%	868-77-9	5 min	0
Isopropanol	67-63-0	<10 min	0
Isopropanol 40%	67-63-0	46-60 min	-
Isopropanol 1,5 %	67-63-0	>480 min	6
Kalium carbonat 35 %	584-08-7	>480 min	6
Klorhexidine 6%	55-56-1	>480 min	6
Klorhexidine diguconate 20%	18472-51-0	>480 min	6
Kohrsolin ekstra 0,5% alkohol		>480 min	6
Korhsolin FF 0,5%		>480 min	6
Korhsolin ekstra 0,5% glutaraldehyde		>480 min	6
Korsolex ekstra 4% glutaraldehyde		>480 min	6
Korsolex med AF 1%		>480 min	6
Korsolex ekstra 4% alkohol		>480 min	6
Korsolex plus 3%		>480 min	6
Lillies væske formalin med methanol 1-3%		>480 min	6
Mikrobac tissue		>480 min	6
Natrium hydroxide 40% (K)	1310-73-2	>480 min	6
Natrium hypochlorite 5%	7681-52-9	>480 min	6
Natriumpercarbonat 20%	15630-89-4	>480 min	6
n-Heptane	142-82-5	< 1 min	0



Nitrilhandsker

Varenummer 290471 - 290475

n-Hexane	110-54-3	<1 min	0
Pereddikesyre 38-40%	79-21-0	<10 min	0
Propanol	71-23-8	<4 min	0
Rely+On, virkon	70693-62-8	>480 min	6
Saltsyre 36%	7647-01-0	28 min	1
Triethylene glycol dimethacrylate 95%	109-16-0	<6 min	0

Cystostatika

Test metode

Bortezomib 1.000 ppm	>480 min.	6
Carmustine 3.300 ppm	>59-75 min.	2
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>480 min.	6
Cytarabine 100.00 ppm	>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>480 min.	6
Epirubicin 2.000 ppm	>480 min.	6
Etoposide 20.000 ppm	>480 min.	6
Flurouracil 50.000 ppm	>480 min.	6
Gemcitabine(Gemzar) 38.000 ppm	>480 min.	6
Irinotecan 20.000 ppm	>480 min.	6
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Oxaliplatin 5.000 ppm	>480 min.	6
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm	>480 min.	6
Thio-Tepa 10.000 ppm	>480 min.	6

Antibiotic

Cefuroxim 90.000 ppm	>480 min.	6
Dicloxacillin 10.000 ppm	>480 min.	6
Gentamicin 40.000 ppm	>480 min.	6

Testet i henhold til EN 374-3:2003, EN16523-1:2015, ASTM D6978-05