



Nitrilhandsker

Varenummer 290690-290694

Abena Nitrilhandske
Pudderfri, hvid, accelerator fri



Beskrivelse

Undersøgeshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)
Fremstillet uden brug af accelerators
Pudderfri
Usterile
Hvid
Glat overflade – yderst god gennemfølingsevne, og blød handske
Med rullekant
Egnet til håndtering af fødevarer
Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001 & ISO 13485

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC and EU direktiv 89/686/EEC
Class I & CATIII
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4
EN374-1 (undtaget pkt. 5.3)
EN 374-2
EN 374-3 (anvendt testmetoden til kemikalie gennemtrængning)
EN 388 (0,0,0,0)
EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:	
Før belastning	6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton



Nitrilhandsker

Varenummer 290690-290694

Strækkevne:

Før belastning

min. 500%

Efter belastning ved 70°C i 166 timer

min. 400%

Forpakning

150 stk. pr. æske

10x150 stk. pr. karton

54 kartoner pr. palle

Tykkelse

Håndflade

0.07 mm (+/- 0.02)

Fingrene

0.10 mm (+/- 0.02)

Håndled

0.05 mm (+/- 0.02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
X-small	290690	5-6	75	240
Small	290691	6-7	85	240
Medium	290692	7-8	95	240
Large	290693	8-9	105	240
X-large	290694	9-10	115	240

Test udført

Sensibiliseringstest

Irritationstest

Cytotoksitet

Restkemikalier

Brudstyrke

FitKit test

Gennemtrængningstid

Pudderrester

Virusgennemtrængning

Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)

Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater nederst på databladet)

Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Nitril	9010-81-5
Titanium Dioxid	13463-67-7
Anti oxidant	68610-51-5
Kalium Hydroxide	1310-58-3



Nitrilhandsker

Varenummer 290690-290694

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
2-Hydroxyethylmethacrylate 50%	868-77-9	14 min	1
2-Hydroxyethylmethacrylate 97%	868-77-9	<5 min	0
Ethanol 70%	64-17-5	2 min	0
Ethidium bromide 1%	1239-45-8	>480 min	6
Formaldehyde 4%	50-00-0	>480 min	6
Formaldehyde 10%	50-00-0	>480 min	6
Formaldehyde 35%	50-00-0	>480 min	6
Glutaraldehyde 1%	111-30-8	>480 min	6
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min	6
Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	>480 min	6
Hydroxyethylmethacrylate 50%	868-77-9	14 min	1
Isopropanol	67-63-0	<1 min	0
Klorhexidine 4%	55-56-1	>480 min	6
Klorhexidin digluconat 20%	18472-51-0	>480 min.	6
Klorhexidin gluconat 4%	18472-51-0	>480 min.	6
Methyl methacrylate	80-62-6	>1 min	0
n-Heptane	142-82-5	<1 min	0
n-Hexane	110-54-3	2 min	0
Natrium hydroxide 40%	1310-72-2	>480 min	6
Perchloric syre 70%	7601-903	117 min	3
Petroleum ether	101316-46-5	1 min	0
Phenol 80 %	108-95-2	<5 min	0
1-Propanol	71-23-8	<5 min	0
Rely+On Virkon	70693-62-8	>480 min	6
Svovlsyre 96%	7664-93-9	>6 min	0
Triethylene glycol dimethacrylate 95%	109-16-0	<12 min	1
Cystostatika			
Bendamustine 5.000ppm		>480 min	6
Bortezomib 1.000ppm		>480 min	6
Carboplatin 10.000ppm		>480 min	6
Carmustine (BCNU) 3.300ppm		>480 min	6
Cladribine 1.000ppm		>480 min	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min	6
Docetaxel 10.000ppm		>480 min	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min	6
Epirubicin 2.000ppm		>480 min	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min	6
Fluorouracil 50.000 ppm		>480 min	6
Gemcitabine 38.000ppm		>480 min	6
Irinotecan 20.000ppm		>480 min	6
Mitoxantrone 2.000ppm		>480 min	6
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm		>480 min	6



Nitrilhandsker

Varenummer 290690-290694

Pemetrexed 25.000ppm	>480 min	6
Thiotepa 10.000 ppm	>480 min	6
Vizada (5-Azacytidine) 25.000ppm	>480 min	6

Testet iht: EN 374-3

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ^{*1}	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ^{*2}	✓	%	%
Rengøring ^{*3}	✓	✓	✓
Fødevarer ^{*4}	✓	✓	✓

^{*1} Specifikke cytostatika test er anført på databladet. ^{*2} Olieholdige cremer og sæber.

^{*3} Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ^{*4} Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

SK114/DK/12.2014

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 3 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges