



Flasken tages vandret ud af holderen.



Øjenkoppen drejes, til forseglingen brydes.



Læn hovedet bagover og skyl.

Vigtigt:

Ved alle skadetyper skal øjenskyllervæsken ramme øjet i en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den.

Kontakt altid en læge og fortsæt skylningen under transporten.



Ved mekaniske skader, læn dig eventuelt frem og skyl.

Skylvejledning for forskellige skadetyper

Mekaniske skader
(Støv, snavs, metal- og træsplinter m.v.)

Skyl med Plum Øjenskyller til fremmedlegemet er skyllet ud.

Syreskader

Skyl ca. 2 minutter med pH Neutral og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller til ubehaget forsvinder eller frem til lægen.

Alkaliske skader

Skyl ca. 2 minutter med pH Neutral og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen.

Andre kemiske skader

Skyl med Plum Øjenskyller til ubehaget forsvinder eller frem til lægen.

PLUM

Plum A/S

Frederik Plums Vej 2

DK-5610 Assens

Tel. +45 6471 2112

Fax +45 6471 2125

info@plum.dk

www.plum.dk