



# GUIDE

## til valg af mobil øjensskyl

### DER ER INGEN DIREKTE LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV TIL VIRKSOMHEDERS ØJENSKYLLELØSNING

Øjensskyl er en del af en virksomheds samlede førstehjælpsforanstaltninger. Den generelle regel om førstehjælpsforanstaltninger er beskrevet i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, Kapitel 5 §23. Heraf fremgår, at arbejdsgiveren skal sørge for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse.

### EN ØJENSKYLLELØSNING SKAL VÆRE:

- Effektiv
- Let tilgængelig
- Hurtig at anvende
- Hygiejnisk

Vælg en øjensskylleløsning, der passer til arbejdspladsen og de skadestoffer eller materialer, der er risiko for at få i øjnene.

**Følg guiden på bagsiden →**



### ARBEJDESTILSYNETS ANBEFALING:

"Ved alle former for øjenætsning skal der omgående skylles med rigeligt, rindende vand. Her er øjensskylleflasker at foretrække".

*Kilde: "Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved ætsninger", Arbejdstilsynet.dk*



# GUIDE til valg af mobil øjenskyll

Dine valg skal afspejle arbejdsopgavens behov.

Hos Plum har du alle mulighederne og kan sammensætte præcis den løsning, du har brug for.

## 1 VALG AF ØJENSKYLLEVÆSKE

### 0,9 % Steril saltvandsopløsning



Denne væske er den mest gængse i markedet, da væsken svarer til øjets naturlige væske og giver en blød skylning. Anbefales til bortskylning af fremmedlegemer og væsker, som ikke er sure eller basiske.

### Steril bufferopløsning



Der findes forskellige bufferede øjenskyllprodukter, som på forskellige niveauer kan neutralisere syrer og baser. Plum tilbyder en fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer både syrer\* og baser. Anbefales til arbejde med kemiske stoffer og materialer, så de skadelige stoffer hurtigt neutraliseres.

### Vær opmærksom på:

Sterile øjenskyllprodukter er medicinsk udstyr. De skal være CE-mærket med nummeret på notified body og skal leve op til kravene i direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EØF). Bed din leverandør om dokumentation, hvis du er i tvivl. Det er din garanti for et effektivt og sikkert produkt.

\* Gælder ikke Flussyre, hvor særlige sikkerhedsforanstaltninger skal følges

## 3 VALG AF ØJENKOP

### Enkelt øjenkop



De fleste flasker er udstyret med en øjenkop udformet til skylning af et øje. Denne løsning er velegnet til områder, hvor der ikke er kemikalier og andre farlige materialer, som kan ramme begge øjne samtidigt.

### DUO øjenkop



Med en DUO øjenkop kan du skylle begge øjne samtidigt med én flaske. Det er en hurtig og effektiv løsning til øjenulykker med kemikalier og farlige materialer, der kan ramme begge øjne samtidigt – for hvilket øje vil du redde?

## 2 TRADITIONEL ØJENSKYLLEFLASKE ELLER SPRAY?

### Traditionel øjenskyllflaske



En øjenskyllflaske giver et stort væskeflow – typisk ca. 100 ml/min. Det giver en effektiv bortskylning og du ved, hvor meget væske, der er i flasken, når du starter. Denne løsning er derfor det sikreste valg, hvis der er tale om en alvorligere ulykke, hvor der skal skylles hurtigt og meget. Disse er engangsflasker, hvor en eventuel restmængde skal kasseres.

### Spray



En spray giver et mindre væskeflow – typisk ca. 17 ml/min. Det er en behagelig skylning, som anbefales til komfortskylning og bortskylning af mindre fremmedlegemer. Spray kan genbruges, til flasken er tom, men det er ikke muligt at se restmængder.

### Vær opmærksom på:

Arbejdstilsynet anbefaler traditionelle øjenskyllflasker.

## 4 VALG AF ØJENSKYLLESTATION

### Åben øjenskyllstation




En øjenskyllstation, der hænger frit passer bedst til meget hygiejne arbejdsområder. Optimalt bør øjenkoppen være tildækket, så der ikke tilføres yderligere til øjet ved skylning.

### Lukkede bokse og skabe



Sådanne løsninger skal være hurtige at åbne og flaskerne hurtige at tage ud. Løsningen er den mest velegnede til de fleste produktområder og værksteder.

### Frostsikker øjenskyllstation

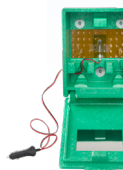

Skyllvæsken skal helst være tempereret. Til udendørsarealer, varebiler, lastbiler og køle-/fryserum m.m. anbefales en øjenskyllstation med varme.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning til at optimere din førstehjælpsforanstaltning, når det gælder øjenskyll.

**Se mere** på [www.plum.dk/produkter/forstehjaelp/ojenskyll](http://www.plum.dk/produkter/forstehjaelp/ojenskyll)

plum